

COLETA DE SECREÇÃO DE OUVIDO

Revisão 0.2

FUNDAMENTOS PARA QUE O EXAME SEJA CORRETO

MATERIAL: Secreção do ouvido em swab com meio de transporte. Quando aplicável e solicitado pelo médico, colher do ouvido direito e esquerdo e identificar os swabs.

RECIPIENTES (fornecidos pelo Laboratório):

- Swab estéril contendo meio de transporte;
- Swab estéril sem meio de transporte para coleta de GRAM;
- Lâminas para esfregaços de GRAM.


Os swabs e lâminas adquiridos em outros laboratórios clínicos também poderão ser utilizados.

PROCEDIMENTO:

- O paciente deverá comparecer ao Laboratório preferencialmente na parte da manhã sem uso de medicamentos;
- O colhedor fará a coleta da secreção do(s) ouvido(s) em swab com meio de transporte.

OBSERVAÇÃO:

1. **Este material poderá vir colhido diretamente do consultório médico:** colher swabs separados (caso o exame seja realizado em ambos os ouvidos) e identificar o material como Secreção do Ouvido Direito e Secreção do Ouvido Esquerdo.
2. Em casos de GRAM (bacterioscopia) é necessária a confecção de duas lâminas de esfregaço devidamente identificadas (ouvido direito e ouvido esquerdo). O esfregaço deverá ser realizado comprimindo o swab sem meio sobre a lâmina realizando movimentos giratórios (figuras A, B, C, D, E, F). Neste caso os swabs utilizados para confecção das lâminas não serão utilizados para realização da cultura. Outro swab (com meio de transporte) deverá ser colhido para realização da cultura.

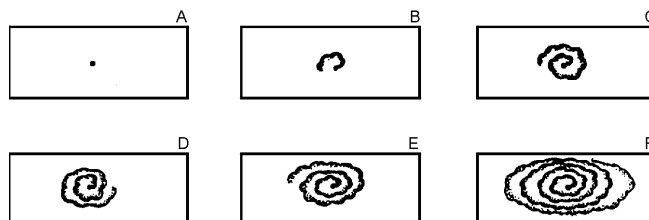

3. Caso o paciente faça uso de algum medicamento o mesmo só deverá ser suspenso com autorização do médico.

Horários de Funcionamento: 2ª à sábado: 06:30 às 19 horas / URGÊNCIA – 24 horas

Endereço: Rua Angélica Mota, 137 Olaria – Rio de Janeiro – RJ

CEP 21.021-490 (PABX) 3977.2000

Recepção: 3977.2126 e 3977.2127

Home page: www.hospitalbalbino.com.br

Email: laboratório@hospitalbalbino.com.br