

COLETA DE SECREÇÃO URETRAL

Revisão 0.1

FUNDAMENTOS PARA QUE O EXAME SEJA CORRETO

MATERIAL: Secreção da uretra colhida em swab com meio de transporte.


RECIPIENTES (fornecidos pelo Laboratório):

- Swab estéril contendo meio de transporte;
- Swab estéril sem meio de transporte para coleta de GRAM;
- Lâminas para esfregaços de GRAM.

Os swabs e lâminas adquiridos em outros laboratórios clínicos também poderão ser utilizados.

PROCEDIMENTO:

1. Aconselha-se realizar a coleta na parte da manhã devido a maior concentração de secreção;
2. Coleta em HOMENS deverá ser realizada antes do paciente urinar;
3. Seguir os procedimentos abaixo caso a coleta seja realizada fora do laboratório:
 - Retirar a secreção da uretra com a ponta do algodão do swab. Em homens o ideal é puxar a pele que recobre o pênis evidenciando melhor a uretra e a secreção;
 - Retirar o swab e colocá-lo dentro do tubo de modo que o algodão contendo a secreção colhida fique mergulhado no meio de transporte (gel);
 - Tampar o tubo e transportá-lo para o laboratório em temperatura ambiente;
4. Em casos de GRAM (bacterioscopia) é necessária a confecção de duas lâminas de esfregaço. O esfregaço deverá ser realizado comprimindo o swab sem meio de transporte sobre a lâmina realizando movimentos giratórios (figuras A, B, C, D, E e F). Neste caso os swabs utilizados para confecção das lâminas não serão utilizados para realização da cultura. Outro swab (com meio de transporte) deverá ser colhido para realização da cultura.

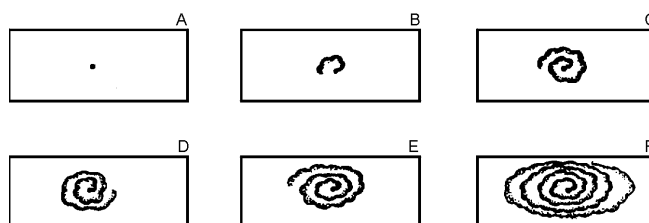

5. O ideal é que esse material venha colhido do consultório médico.
6. Caso o paciente faça uso de algum medicamento o mesmo só deverá ser suspenso com autorização do médico.

Horários de Funcionamento: 2ª à sábado: 06:30 às 19 horas / URGÊNCIA – 24 horas

Endereço: Rua Angélica Mota, 137 Olaria – Rio de Janeiro – RJ
CEP 21.021-490 (PABX) 3977.2000 Recepção: 3977.2126 e 3977.2127

Home page: www.hospitalbalbino.com.br

Email: laboratório@hospitalbalbino.com.br